



Quick reference guide – **permanent** soft lining in the laboratory / flask technique
 Guide de référence rapide – regarnissage souple **permanent** en laboratoire



Technique works with different processing systems .

La technique fonctionne avec différents modes de cuisson.



Prepare spacer and close flask.

Préparer l'espaceur et fermer le moufle.


Process and cool as usual.

Faire cuire et refroidir comme à l'habitude.



Open flask carefully without deflasking.

Séparer le moufle avec précaution sans déflouffler.

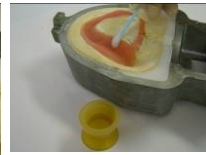

Clean denture surface with monomer - let completely dry.

Nettoyer la surface de la prothèse avec du monomère et laisser sécher complètement.



Adhesive layer 1 wait 30 sec.

1ere couche d'adhésif attendre 30 sec.



Adhesive layer 2 wait 2 min.

2e couche d'adhésif attendre 2 min.



35 min
 50°C/120°F



Apply sealant on trimmed areas only.

Appliquer le scellant sure les endroits qui ont été meulés seulement.



Bench dry 7 min.

Laisser secher sur le comptoir pendant 7 min.



30 min
 50°C/120°F
 (optional / optionel)