



Quick reference guide - **temporary** soft lining chairside
 Guide de référence rapide – regarnissage souple **temporaire** a la chaise

Karlin
 DENTAL DISTRIBUTORS INC.
 1 800 922 2622



Adhesive layer 1
 wait 30 sec.

1ere couche d'adhésif
 attendre 30 sec.



Adhesive layer 2
 wait 2 min.

2e couche d'adhésif
 attendre 2 min.



Mouth setting time 5 min.

Temps de prise en
 bouche 5 min.



15 min
 50°C/120°F



Apply Sealant on trimmed
 areas only - bench dry 7 min.

Appliquer le scellant sur les
 endroits qui ont été meulés
 seulement. Laisser sécher sur
 le comptoir pendant 7 min.



Insert
 denture into
 patient
 mouth.

Mise en
 bouche.



Quick reference guide - **temporary** soft lining chairside
Guide de référence rapide – regarnissage souple **temporaire** a la chaise



1.

Adhesive layer 1
wait 30 sec.


1^{ere} couche
d'adhésif attendre
30 sec.



2.

Adhesive layer 2
wait 2 min.

2^e couche d'adhésif
attendre 2 min.

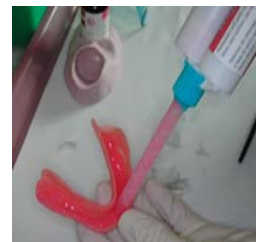

3.

Mouth setting time 5
min.

Temps de prise en
bouche 5 min.



4.

Trim excess material
carefully.

Meulero les excédents
de matériau avec
precaution.



5.

Insert denture
into patient
mouth.

Mise en bouche.